

Rystora®

IN HARMONY WITH YOUR SKIN



Lámina de Silicona para Cicatrices (No estéril)




REDUCE EL TAMAÑO Y COLORACIÓN DE
CICATRICES HIPERTRÓFICAS Y QUELOIDES

Lámina de Silicona para Cicatrices Rystora®

un tratamiento seguro, efectivo y reutilizable para cicatrices en la piel y las articulaciones. La lámina consigue rápidas mejoras en el rejuvenecimiento de la piel tras una operación, quemadura o heridas pequeñas, además de reducir eficazmente el tamaño, ladureza, el picor y la coloración de las cicatrices.



SILICONA DE GRADO MÉDICO 100%

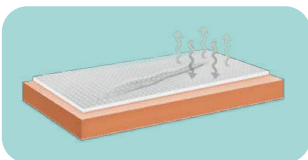


TRANSPIRABLE Y ANTI IRRITACIÓN



VERTUALMENTE INDOLORO DE QUITAR



FLEXIBLE Y FÁCIL DE APLICAR EN LAS ARTICULACIONES

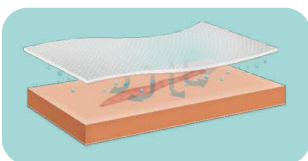

MANTIENE LA PIEL HÚMEDA



REUTILIZABLE Y LABANLE

INDICACIONES DE USO

- Asegúrese de que la piel está limpia, seca y libre de pomadas o cremas antes de aplicar la lámina.
- La lámina se puede recortar al tamaño necesario para cicatrices pequeñas o grandes.
- Se debe llevar la lámina consecutivamente durante un mínimo de 12 horas al día y un mínimo de 8 semanas para resultados óptimos.
- La lámina se puede reutilizar al menos 7 días siempre que se limpie y se seque diariamente.

ESPECIFICACIONES

REF. No.	Descripción	
SA050701	Pequeño: 2"x3" (5x7.5cm)	1 pieza/ caja
SA050712		12 pieza/ caja
SA101801	Normal: 4"x7" (10x18cm)	1 pieza/ caja
SA101812		12 pieza/ caja
SA042501	Tira: 1.6"x10" (4x25cm)	1 pieza/ caja
SA042512		12 pieza/ caja



Rystora®

Fortune Medical Instrument Corp.

6 F., No. 29, Sec. 2, Jhongjheng E. Rd., Danshuei Dist, New Taipei City 251, Taiwan

Manufactured by: No. 256, Changchun 2nd, Rd., Jhongli Dist, Taoyuan City 320, Taiwan

T. +886 2 2624-2233 www.rystora.com

Rystora® es una marca registrada de Fortune Medical.

